

スマイルデンチャーの使用方法

スマイルデンチャー

簡単お手入れ除菌入れ歯洗浄方法

金具のない入れ歯スマイルデンチャーは、専用洗浄剤にて、毎日洗浄してください。汚れを落とす場合は柔らかいブラシを使用してください。

また、スマイルデンチャーは塩素系の洗浄剤を使用されますと、変質・変色のおそれがございますので、絶対に使用しないでください。お手入れには歯科医院にて、専用の洗浄剤をお求めの上、お手入れくださいますようお願い致します。

スマイルデンチャー専用洗浄剤のご使用方法

- 約 180cc のぬるま湯（60℃未満）に、付属のスプーン山盛り 1 杯を溶かし、そのまま 3 分間放置します
- 入れ歯を水ですすぎ、付着物は柔らかい歯ブラシで落とした後、約 15 分間、洗浄液に浸けます。
- 汚れがひどいときは、一晩浸けておきましょう
- 浸け置き洗浄した後は、入れ歯を流水ですすいでください



- 一度洗った洗浄液は冬季で 7-10 日、夏季で 4-5 日間使用できます。
- 専用洗浄剤は、10 袋入りで半年から 10 ヶ月使用できます。
- 濃縮タイプで、すばやく、強力な洗浄力を発揮し、入れ歯を清潔に保ちます。



スマイルデンチャーは毎食後キレイに水洗いしましょう

スマイルデンチャーは、毎食後、軽く水洗いすると長くキレイにお使い頂けます。

特にカレー、福神漬、赤ワイン、コーヒー、紅茶など、色の着きやすい（着色しやすい）食材を飲食された場合、できるだけ早く水洗いしてください。

上手なスマイルデンチャーのはずし方

スマイルデンチャーを取り外す時は、ウイングの先端部分ではなく、付け根の厚みのある部分に指をかけて、持ち上げるようにして、そっとはずしましょう。



スマイルデンチャーご使用のご注意

- 専用洗浄剤は、お子様の手の届かないところへ保管してください
- 金属製容器は錆びるおそれがございますので使用しないでください
- 熱湯（90℃以上）は使用しないでください。入れ歯の変形・変色のおそれがあります。
- 本剤の使用により、金属が一部変色する場合があります。その場合はだちに使用を中止してください
- 本剤を入れ歯の洗浄以外に使用しないでください
- 洗浄剤を目や口に入れないでください。万一入った場合にはよく洗い流し、医師の診断をうけてください。



お大事になさってください。